



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

Bomba de Nutrição Enteral

Guia Rápido de Instrução



Se o alarme ocorrer:

 Silenciar alarme


Detectar a causa e prosseguir para a ação apropriada

 Liberar alarme


 Retomar a Infusão




Bateria vazia
Ligue a bomba a energia elétrica imediatamente.

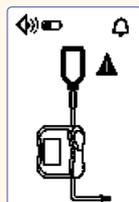


Alarme de Frasco vazio /ar/bolha
Verificar presença de bolhas / Trocar o frasco.

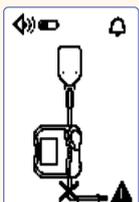

Alarme de oclusão Inferior
Indica oclusão inferior (entre a bomba e o paciente)

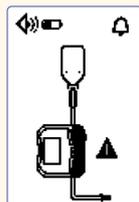


Alarme de porta aberta
Fechar a porta

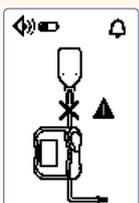


Alarme de oclusão Superior
Indica oclusão superior (oclusão entre dieta e bomba).




Pré alarme de fim de infusão
Aviso de fim de infusão próximo.

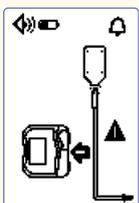

Alarme de instalação de equipo
Verifique se o equipo está corretamente instalado.

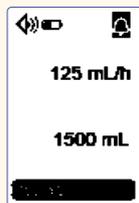

Alarme de Volume Alvo Atingido
Fim da infusão.

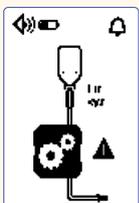

Alarme de Erro Técnico
Verificar o código do erro (Err xyz) e entrar em contato com o departamento técnico.



Lembrete de início
Bomba ligada sem infundir e sem intervenção. Aguardando START.

Amika®

Bomba de Nutrição Enteral

Guia Rápido de Instrução




IVT057v01mai19

Este documento pode conter imprecisões ou erros tipográficos. Modificações podem ser feitas e incluídas em edições posteriores. Devido a à atualização das normas e dos textos e materiais jurídicos, as características indicadas no texto e nas imagens deste documento são aplicáveis apenas ao dispositivo com o qual está vinculado.

Bomba Amika®
Registro ANVISA: 80145119009

1. Instalação do Equipamento

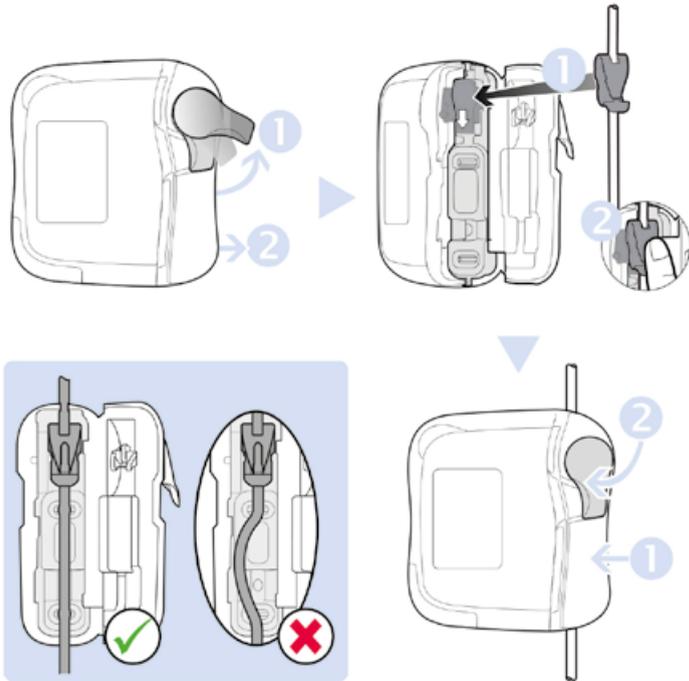


2. Descrição da interface



3. Operações

3.1. Ligue a bomba

3.2. Preparar o Equipamento

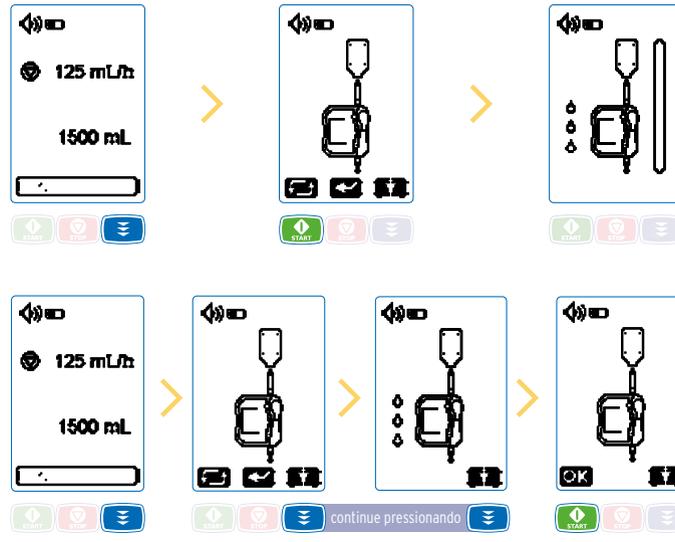


3.3. Definir taxa de fluxo (mL/h)



3.4. Definir volume total (mL)



3.5. Iniciar a Infusão

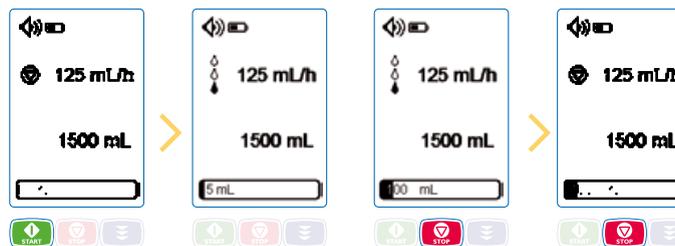

> 2s: Zerar Volume infundido. Reinicialização da barra de progresso.

Bloqueio /
desbloqueio
do teclado > 2s

Desligue
a bomba > 2s

4. Menu

STOP

em seguida, pressione a tecla MENU



- Ativação / desativação do volume alvo
- Ativação / desativação do modo noturno
- Definições de som
- Ativação / Desativação de bloqueio de configurações *
- Armazenamento de volume de alimentação cumulativo
- Histórico de alarme
- Histórico de infusão
- Configurações de contraste / brilho
- Tempo entre 2 sons de alarme configurados *
- Tempo entre o pré alarme de fim de infusão e o volume total programado alcançado *
- Informação técnica

* código de acesso requerido